

Příslušenství
pro ošetřování
stomií
pro každého
stomika

me +




convatec
— forever caring —

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

JAK POUŽÍVAT PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství slouží k řádnému ošetření kůže v okolí stomie. Díky jeho používání šetříme naši kůži a zajistíme, že pomůcka bude dobře držet. Pokud chceme mít kůži v okolí stomie zdravou, stačí, když budeme dodržovat **4 jednoduché kroky** a můžeme si být jistí, že pomůcka bude vždy dobře držet a my se na ni budeme moci spolehnout.

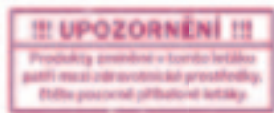

ODSTRANĚNÍ A OČIŠTĚNÍ

- Odstraňovače podložky
- Čisticí prostředky



VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ V OKOLÍ STOMIE

- Adhezivní pasty
- Těsnicí manžety



OCHRANA KŮŽE A PREVENCE PROTI ZÁPACHU

- Zásypové pudry
- Ochranné krémy a filmy
- Pohlcovače pachu
- Prostředky zahušťovací



VĚTŠÍ FIXACE POMŮCKY PŘI JEJÍM NOŠENÍ

- Pásky vyrovnávací
- Stomické přídržné a břišní pásy



ODSTRANĚNÍ POMŮCKY A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

ODSTRAŇOVAČE PODLOŽKY



ODSTRAŇOVAČ PODLOŽKY SION

Jemně odstraňuje zbytky adhesiv (lepidel) z kůže, a tím snižuje diskomfort, který byste mohli při odstraňování pomůcek cítit. Účinně rozpouští adheziva používaná v lékařských páskách nebo ve stomických podložkách. Napomáhá účinnému odstranění bez poškození kůže, což je pro stomiky velmi důležité. Při výměně pomůcky se jemně nadzvedne její okraj a ubrousek se vloží mezi kůži a lepicí vrstvu a za stálého potírání se pomůcka sejme. Pokožka se následně omyje teplou vodou a čisticí pěnou, a poté osuší.

ODSTRAŇOVAČE PODLOŽKY SILIKONOVÉ

ESENTA™ ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL – UBROUSKY NEBO SPREJ



ESENTA™ je nepálivý odstraňovač náplasti, který neobsahuje alkohol ani parfémy. Je vyroben ze silikonové směsi, která nepálí, tudíž je velmi šetrný k pokožce. K dispozici je ve formě ubrousků anebo spreje. K odlepení pomůcky stačí jen pár stříknutí.



ČISTICÍ PĚNY

ČISTICÍ PĚNA STOMFOAM®

Speciálně vyvinutá pěna určená pro čištění kůže v okolí stomie. Snadno se aplikuje, při použití nestéká. Má neutrální pH a je zcela přírodní, bez barviv a konzervantů. Nezanedbává zbytky lepidla, které snižují přilnavost pomůcky. K dispozici je varianta MAXI a cestovní balení MINI.



VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ V OKOLÍ STOMIE

ADHEZIVNÍ PASTY



PASTA VYROVNÁVACÍ STOMAHEIVE® 60 g

Používá se k vyrovnání kožních záhybů a nerovností. Je lepicí a aplikuje se přímo na kůži do prohlubní a záhybů k jejich vyrovnání nebo na spodní (lepicí) stranu pomůcky v okolí

předstříženého otvoru. Po vyparchání alkoholu, který obsahuje, pasta ztvrdne a vytvoří bariéru. Zabraňuje tak případnému podtékání a zlepšuje přilnavost pomůcky. Pastu aplikujte pomocí navlhčeného prstu.

TĚSNICÍ MANŽETY

TĚSNICÍ KROUŽEK STOMAHESIVE®

Slouží k vyplnění kožních záhybů a nerovností. Je elastický, velice dobře se tvaruje a upravuje dle individuálních potřeb. Je možné ho trhat a použít jen část nebo opět spojit či vrstvit tak, aby stomická pomůcka přilnula po celé své lepicí ploše. Těsnicí kroužek je vyroben z hmoty Stomahesive®. Snadno se odstraňuje zároveň se stomickou pomůckou. Po odstranění nezanechává téměř žádné zbytky hmoty na kůži. Absorbuje tekutinu a jemně gelovatí. Neobsahuje alkohol.



OCHRANA KŮŽE A PREVENCE PROTI ZÁPACHU

ZÁSYPOVÉ PUDRY, OCHRANNÉ KRÉMY A FILMY



PUDR OCHRANNÝ STOMAHESIVE®

Pomáhá chránit kůži před nadměrnou vlhkostí, která může poškodit kůži. Používá se ve velmi tenké vrstvě na čistě omytou a osušenou pokožku. Lahvičku s pudrem držte vodorovně, asi 7–10 cm od těla a zmačkněte. Vytvoří se obláček, který pudr rovnoměrně rozptýlí na požadovaném místě. Před nalepením nové pomůcky odstraňte přebytečný pudr pomocí buničité vaty a poté můžete přetřít Ochranným filmem Sion nebo Esenta™ nebo rovnou nalepit pomůcku.

OCHRANNÝ FILM ESENTA™

Ochranný film Esenta™ vytvoří prodyšný film, který chrání kůži před agresivním střevním obsahem. Neobsahuje alkohol, tudíž je šetrný k pokožce a neštípe. Použít ho můžete buď ve formě ubrousků anebo spreje.



convatec
— forever caring —



OCHRANNÝ FILM SION

Ochranný film pomáhá chránit kůži před podrážděním způsobeným adhezivou/lepidly, obsaženými ve stomických pomůckách. Na kůži v okolí stomie zanechává jemný prodyšný film, který pomáhá snižovat tření, ke kterému dochází mezi pomůckou a kůží. Ochranný film zasychá velmi rychle a nezanechává žádné zbytky na kůži. Kůže je tedy po několika sekundách připravena na nalepení nové stomické pomůcky.

Aplikujte jej na čistě omytou a osušenou pokožku do okolí stomie před nasazením pomůcky a nechte zaschnout. Obsahuje alkohol.

POHLCOVAČ PACHU

POHLCOVAČ PACHU STOMODOR® SPRAY

Efektivně odstraňuje nepříjemné pachy ze stomických sáčků a materiálů v okolí stomie. Při tuhé stolici se aplikuje přímo do sáčku před nasazením. Pro zvýšení efektu odstraňování pachu můžeme neředěný rozprašovat také do prostoru anebo na jakýkoliv materiál. Postupujte dle návodu na rozprašovači. K dispozici je varianta MAXI a cestovní balení MINI.



POHLCOVAČ PACHU STOMODOR® DROPS

Efektivně odstraňuje pachy ze stomických sáčků. Promíchává se s obsahem sáčku, kde pohlcuje pachy přímo u zdroje a poté uzavře hladinu sáčku nepropustným filmem. Aplikujte do sáčku před nasazením 10–20 kapek. Dle potřeby je možné dávkování zvýšit. Prodlužuje a zefektivňuje funkci a životnost filtru.

PROSTŘEDKY ZAHUŠŤOVACÍ

GELUJÍCÍ SÁČKY ESENTA™ DIAMONDS®

Slouží k zahuštění střevního obsahu a jsou určeny pro všechny stomiky s řídkou či vodnatou stolicí. Gelující sáčky zabraňují podtékání, nafukování sáčku a navíc pohlcují zápach. Aplikace je velice jednoduchá. Sáček nerozbalujte, rovnou vhodte horním otvorem do sáčku (před nasazením) nebo aplikujte výpusti (po vypuštění obsahu a očištění výpusti). Jakmile se sáček dostane do styku s tekutinou, obal se rozpustí a jednotlivé granulky přemění tekutinu v gel. Sáčky obsahují složku ActiveOne™, jež je na bázi aktivního uhlí a spolehlivě pohlcuje zápach. Zároveň zabarví obsah do černa. Můžete si vybrat z většího balení obsahující 100 ks nebo z menšího po 30 ks.





VĚTŠÍ FIXACE POMŮCKY PŘI JEJÍM NOŠENÍ

PÁSKY VYROVNÁVACÍ

VYROVNÁVACÍ PÁSKY ESENTA™

Pásky Esenta™ zajistí dokonalou fixaci pomůcky ke kůži. Jsou vyrobeny z hydrokoloidní hmoty, která je šetrná ke kůži a zcela se přizpůsobí křivkám a pohybům těla. Výborně drží pomůcku i v kožních záhybech. Pásky jsou voděodolné, takže pomůcku skvěle chrání i při plavání. Lze je stříhat dle potřeby a spolehlivě ochrání i před mechanickým poškozením – např. při nošení přídržného pásu.



STOMICKÉ PÁSKY – PŘÍDRŽNÉ

PÁSEK

Pásek se doporučuje uživatelům konvexních pomůcek a všem dalším uživatelům, kteří používají sáčky vybavené poutky k uchycení pásu. Zvyšuje pocit jistoty a bezpečí a podporuje přilnavost pomůcky.



convatec



Odstraňovače stomické podložky – limit 292,32 Kč/měsíc

kategorie: 03.08.04.01

5016531	Odstraňovač podložky Sion	ubrousky, 100 ks	584,34 *
---------	---------------------------	------------------	----------

Odstraňovače stomické podložky – silikonové – limit 487,20 Kč/měsíc

kategorie: 03.08.04.02

5014529	Odstraňovač lepidel Esenta™	sprej, 50 ml	243,37
5014528	Odstraňovač lepidel Esenta™	ubrousky, 30 ks	486,95

Čistící roztoky, čistící pěny, tělové čistící ubrousky – limit 292,32 Kč/měs. kategorie: 03.09.02.01

5014245	Čistící pěna StomFoam® Maxi	200 ml	292,32
5014244	Čistící pěna StomFoam® Mini	50 ml	146,14

Adhesivní pasty a gely – limit 1 ks/měsíc

kategorie: 03.08.01.03

5006803	Pasta vyrovnávací Stomahesive®	60 g	plně hrazeno
---------	--------------------------------	------	--------------

Těsnící manžety – limit 60 ks/měsíc

kategorie: 03.08.01.05

5006685	Těsnící kroužek Stomahesive®	48 mm, 10 ks	plně hrazeno
5006663	Těsnící kroužek Stomahesive®	48 mm, tenký, 10 ks	plně hrazeno
5006652	Těsnící kroužek Stomahesive®	98 mm, 10 ks	plně hrazeno

Destičky a roušky – limit: plná úhrada

kategorie: 03.08.01.04

5006851	Destička vyrovnávací Stomahesive®	10 x 10 cm, 5 ks	plně hrazeno
5006853	Destička vyrovnávací Stomahesive®	20 x 20 cm, 3 ks	plně hrazeno

Zásypové pudry, ochr. krémy a filmy, přídržné proužky – limit 974,4 Kč/měsíc

kategorie: 03.09.01.01

5016532	Ochranný film Sion	ubrousky, 100 ks	486,95
5014531	Film ochranný Esenta™	sprej, 50 ml	500,25
5014530	Film ochranný Esenta™	ubrousky, 30 ks	974,40
5006849	Pudr Stomahesive®	zásypový, 25 g	486,95

Prostředky zahušťovací – limit 350,56 Kč/měsíc

kategorie: 03.08.03.01

5018229	Gelující sáčky Esenta™ Diamonds®	100 ks	1 051,81 **
5018228	Gelující sáčky Esenta™ Diamonds®	30 ks	350,56

Pohlčovače pachu – limit 340,48 Kč/měsíc

kategorie: 03.08.05.01

5002118	Pohlčovač pachu StomOdor® Spray Maxi	210 ml	166,60
5002119	Pohlčovač pachu StomOdor® Spray Mini	50 ml	128,66
5002120	Pohlčovač pachu StomOdor® Drops	35 ml	166,60

Pásky vyrovnávací – limit 120 ks/měsíc

kategorie: 03.08.01.02

5016486	Vyrovňovací pásek Esenta™ půlkruh	3 x 15 cm, hydrokoloidní, 20 ks	plně hrazeno
5016485	Vyrovňovací pásek Esenta™ čtvrtkruh	3 x 9 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plně hrazeno
5016484	Vyrovňovací pásek Esenta™ rovný tvar	3 x 11 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plně hrazeno
5017935	Vyrovňovací pásek Esenta™ rovný tvar	5 x 11 cm, hydrokoloidní, 30 ks	plně hrazeno
5017936	Vyrovňovací pásek Esenta™ rovný tvar	5 x 22 cm, hydrokoloidní, 20 ks	plně hrazeno

Stomické pásky – maximálně 194,88 Kč včetně DPH/kus; max. 2 ks/rok kategorie: 03.08.02.01

5006860	Pásek	přídržný, 1 ks	plně hrazeno
---------	-------	----------------	--------------

Úhrady a limity jsou včetně DPH, * plná úhrada 1 balení na 2 měsíce, ** plná úhrada 1 balení na 3 měsíce.



convatec
— forever caring —

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY U Radima

Zákazníci z Prahy a Ostravy mohou využít služeb prodejen Zdravotnických potřeb „U RADIMA“, kde najdou kompletní sortiment pomůcek společnosti Convatec.

PRAHA: Gemini – budova B – zadní strana budovy (vchod z ulice Pikrtova)
Na Pankráci 1683/127 a 1724/129, 140 00 Praha 4-Nusle
Mobil: 734 397 972

Dopravní spojení: metro trasa C – stanice Pankrác

Otevřeno: Po–Pá: 9–16 hodin

OSTRAVA: Českobratrská 63, 702 00 Ostrava, Tel.: 596 618 459
Dopravní spojení: autobus č. 37, 38, 50, trolejbus č. 102, 103, 104 a 105,
stanice Českobratrská. **Otevřeno:** Po–Pá: 8–17 hodin

zásilková služba
800 321 222

Zásilková služba

Poukaz potvrzený lékařem zašlete poštou na adresu: ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1. ePoukaz můžete zaslat na telefonní číslo 778 778 770 nebo na e-mail: epoukaz@convatec.cz. Do 3 pracovních dnů po obdržení poukazu v distribučním centru zboží připraví a společnost DPD vám je doveze až domů v diskrétním obalu. Doručení zdarma – veškeré náklady na poštovné a balné hradí společnost Convatec. Chráníme vaše soukromí.


Stomalinka®
convatec

me + program
pro stomiky



[www.facebook.com/
stomikradimconvatec](https://www.facebook.com/stomikradimconvatec)



[@stomikradim_convatec](https://www.instagram.com/@stomikradim_convatec)



[@convatecceskairepublika](https://www.youtube.com/@convatecceskairepublika)

convatec.cz

Adresa společnosti a distribuce (zásilková služba):
ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1